

ZHW Katowice	Kryteria przyjęcia próbek krwi kur i indyków do badań w kierunku chorób zakaźnych Pracownia Serologii Aneks nr 5/PO-02	Data obowiązywania: 03.04.2017
		Wydanie:2 Strona/stron:1/1

**Ogólne Zasady Współpracy z Laboratorium” oraz formularze zleceń dostępne są na stronie [www.katowice.wiw.gov.pl](http://www.katowice.wiw.gov.pl) i w Punkcie Obsługi Klienta.**

1. Próbkę krwi kur i indyków do badań serologicznych należy pobierać zgodnie z obowiązującymi standardami weterynaryjnymi z wykorzystaniem sterylnych, jednorazowych probówek z tworzywa sztucznego.
2. Wymagana objętość pojedynczej próbki to min. 1 ml krwi pełnej.
3. Bezpośrednio po pobraniu, krew należy pozostawić w temperaturze pokojowej przez około 30 minut. Ze względu na możliwość hemolizy nie można próbek krwi pełnej zamrażać.
4. Materiał do badań powinna dostarczać osoba upoważniona, odpowiedzialna za stan przewożonych próbek.
5. Do laboratorium próbki należy dostarczyć w szczelnie zamkniętych probówkach, opisanych w sposób trwały wraz z czytelnie wypełnionym formularzem zleceń. Krew powinna być transportowana w pozycji pionowej, a opakowanie zbiorcze próbek opatrzone napisem „Materiał Zakaźny”.
6. Laboratorium nie bierze odpowiedzialności za ryzyko związane z przesyłaniem próbek krwi pocztą. Wymagane jest, aby materiał biologiczny dostarczony był do badań osobiście, kurierem lub przesyłką specjalną.
7. Ponieważ uzyskanie wyniku dodatniego badanej próbki wymaga bezzwłocznego potwierdzenia, próbki do badań należy dostarczać maksymalnie do czwartku do godziny 10, aby umożliwić zakończenie badań potwierdzających w danym tygodniu analitycznym.
8. Laboratorium nie przyjmuje próbek:
  - o zbyt małej objętości,
  - w uszkodzonych lub nieszczelnych probówkach,
  - zhemolizowanych, zanieczyszczonych lub nieświeżych,
  - pobranych na EDTA lub inne związki antykoagulacyjne,
  - co do których istnieje podejrzenie, że zostały pobrane do probówek zawierających wcześniej związki chemiczne po ich wypłukaniu czy usunięciu.